




# Acro 2019-nCoV IgG / IgM gyorseszteszt

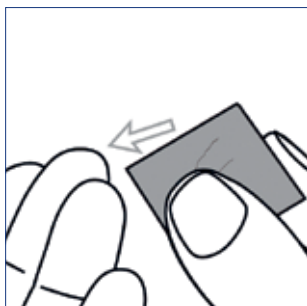


**1** Vegyen mintát a középső vagy a gyűrűs ujj oldaláról. Használjon alkoholos törlőkendőt az ujjbegy tisztításához.

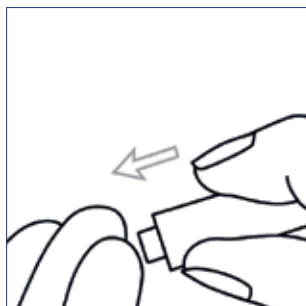


**2** Helyezze a lándzsát szorosan a bőrhöz, és szűrje át a bőrt. Préselje ki és törölje le az első vércseppet.

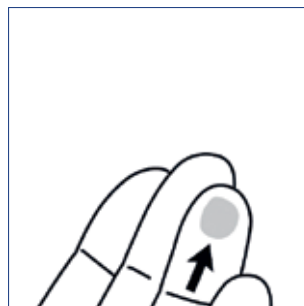


**3** A vérzés fokozása érdekében préselje az ujját, de ne folyamatosan.

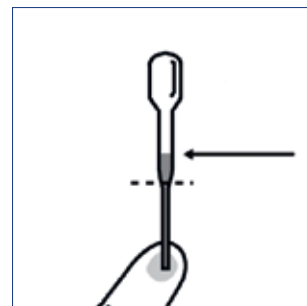


**4** Tartsa a cseppentőt függőlegesen és vegyen vért 1 cm-el a töltésvonal fölé.

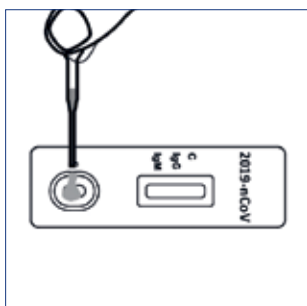

**5** Vegye ki a kazettát a fóliásdobozból, és helyezze tiszta és sima felületre. Helyezzen megfelelően egy teljes csepp vért (kb. 20 mikroliter) a minta helyére. (S)

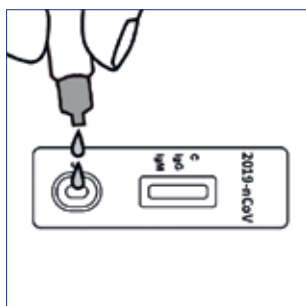


**6** Adjon hozzá két csepp pufferoldatot ( kb. 80 mikroliter ) és indítson el időmérőt.

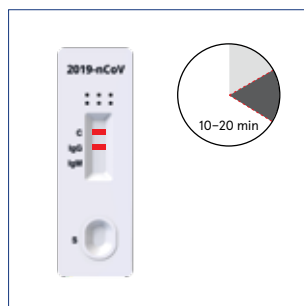

**7** Olvassa le az eredményeket 10 perc múlva. Ne értelmezze az eredményeket 20 perc elteltével.


A teszt elvégzése előtt olvassa el a használati útmutatót.

# Acro 2019-nCoV IgG / IgM gyorseszteszt

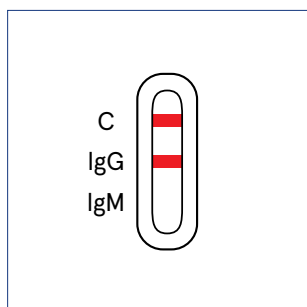


### IgG pozitív eredmény

Két színes vonal jelenik meg. Az egyik színes vonal a kontroll vonal régióban (C) jelenik meg, a másik vonal pedig az IgG régióban.

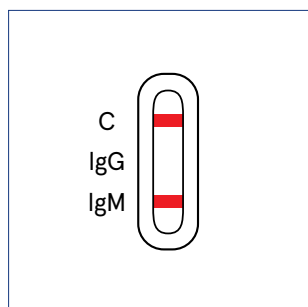


### IgM pozitív eredmény

Két színes vonal jelenik meg. Az egyik színes vonal a kontroll vonal régióban (C) jelenik meg, a másik vonal pedig az IgM régióban.

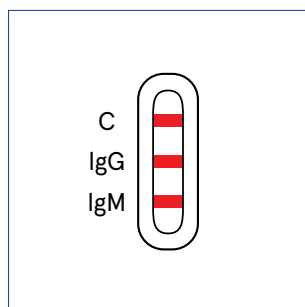


### IgG és IgM pozitív eredmény

Három színes vonal jelenik meg. Egy színes vonal a kontroll vonal régióban (C), a másik vonal az IgG régióban, a harmadik az IgM régióban.

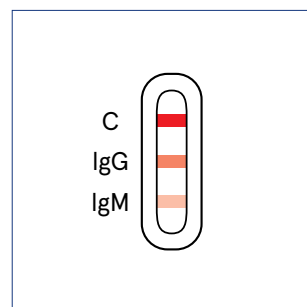


### MEGJEGYZÉS:

a szín intenzitása nagyban függ a mintában lévő 2019-nCoV antitestek koncentrációjától. A tesztvonal bármely színárnyalatát pozitívnak kell tekinteni.

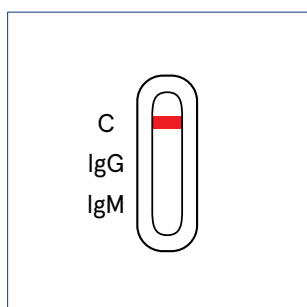

### Negatív eredmény

Egy színes vonal van a kontroll régióban (C). Nincs vonal az IgG és IgM régiókban.

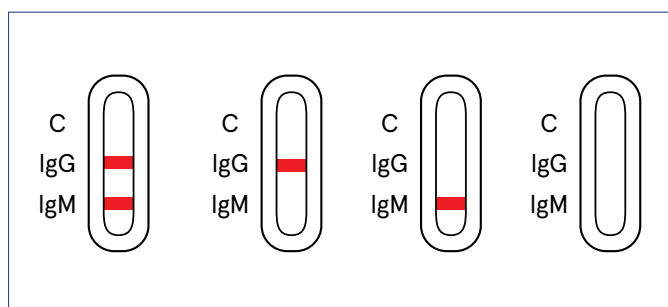

### Érvénytelen eredmény

Kontroll vonal (C) nem jelenik meg. Vizsgálja felül az eljárást, és ismételje meg a tesztet egy új teszttel. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a tesztkészlet használatát ne folytassa és vegye fel a kapcsolatot az Aidian képviselőjével.

**Kizárólag  
professzionális  
in vitro diagnosztikai  
felhasználásra.**

## Kapcsolat

Aidian Oy Finnország

HU, CZ, SK, PL képviselő:

Csehország, Prága, Bélohorská u. 57

Magyarországi munkatárs telefonszáma:

+36205019012

Megrendelés: info@aidian.hu

### Termék

Acro 2019-nCoV IgG / IgM  
Gyorseszteszt Kazetta, 25 teszt

### Termék száma

INCP-402

### Rendelési szám

154601